



NOWOŚĆ

Mediwipes[®] DM Premium

**Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni
oraz różnego rodzaju wyposażenia.**


- dezynfekcja małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych
- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
- delikatne dla powierzchni

Preparat do użytku profesjonalnego.
Produkt biobójczy – pozwolenie
nr 9280/23 (Kat. I, gr. 2)

NOWOŚĆ

Mediwipes® DM Premium

Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia.

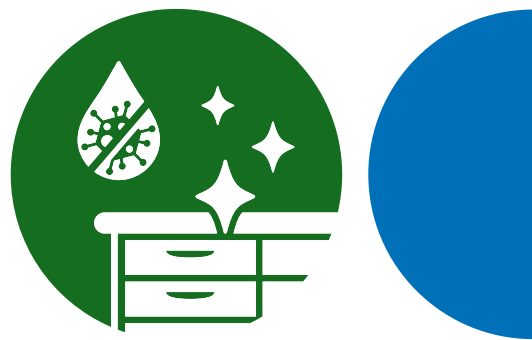

PODSTAWOWE CECHY

- wykazują szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżakobójcze, oraz aktywność wobec wirusów (Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Herpes, Corona, Rota, Adeno, Noro)
- czas działania: 5 minut
- dedykowane do materiałów wrażliwych na działanie alkoholu
- znajdują szerokie zastosowanie do dezynfekcji i mycia delikatnego wyposażenia, które nie może być dezynfekowane poprzez zanurzenie (np. sprzęt rehabilitacyjny, kable, turbiny, pasy do masażu)
- możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych
- dostępne w różnych opakowaniach, w tym w komfortowym opakowaniu typu flow-pack – foliowe opakowanie wyposażone w klips chroniący włókninę przed wysychaniem, zawierającym chusteczki w dużym rozmiarze i wysokiej gramaturze

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:

Substancja czynna: 290 mg/g płynu- chlorek didecyldimetyloamoni; < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, zapach

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

bakterio-, drożdżakobójcze oraz aktywność wobec wirusów: Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Herpes, Corona, Rota, Adeno, Noro - 5 min.

OPAKOWANIA

Mediwipes® DM Premium:
tuba (Nr kat. wewn. 7537) – 100 szt.


Mediwipes® DM Premium: wkład uzupełniający
(Nr kat. wewn.: 7538) – 100 szt.
(12 cm x 18 cm; 25 g/m²)

Mediwipes® DM Premium: opakowanie flow-pack
(Nr kat. wewn.: 7539) – 100 szt.
(18 cm x 20 cm; 45 g/m²)

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.
Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia.

1. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę.
2. Przetrzeć chusteczką całą powierzchnię dezynfekowanego wyposażenia.
3. Odczekać zalecany czas ekspozycji – min. 5 min.
W razie potrzeby powtórzyć procedurę.
Nie spłukiwać. Pozostawić do wyschnięcia.
4. Pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć.

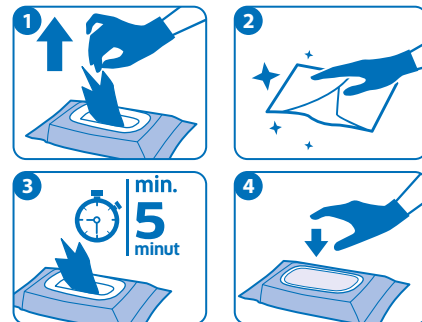

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

WYTWÓRCA:

Laboratoires Sarbec
10 rue du Vertuquet
59960 Neuville-en-Ferrain • France

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2505-03



medilab.pl